

Aufbereitung von Tuchspendersystemen



1 Vorbereitung

Ziehen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung an. Desinfizieren Sie die Arbeitsfläche gründlich. Beachten Sie dabei die Einwirkzeiten und die vollständige Benetzung der zu desinfizierenden Fläche. Stellen Sie sich alle nötigen Materialien griffbereit.



5 Beutel aufschneiden

Nachfüllbeutel mit einer sauberen Schere vorsichtig im oberen Drittel des Beutels aufschneiden. Achten Sie darauf, den Beutel so aufzuschneiden, dass die Rolle hochkant im Eimer stehen kann.



2 Eimer leeren

Ziehen Sie das alte Klebeetikett vom Eimer ab. Entsorgen Sie die Produktreste ordnungsgemäß. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung auf dem Sicherheitsdatenblatt des Produkts.



6 Eimer befüllen

Bitte überprüfen Sie zunächst den Spendereimer und Deckel vor jeder Wiederbefüllung auf Schäden. Stellen Sie die vorgetränkte Tuchrolle inkl. Beutel hochkant in den trockenen Spendereimer.



3 Manuelle Reinigung

Bauen Sie das Pop-up und den Deckel auseinander. Reinigen Sie alle Einzelteile inkl. Eimer mit einem geeigneten Desinfektionsmittel (**bakterizid, fungizid und sporizid**) sorgfältig, um etwaige Verschmutzungen oder Rückstände zu entfernen.



7 Vorbereitung Entnahme

Ziehen Sie das innerste Tuch der Rolle heraus und fädeln Sie es durch die sternförmige Entnahmeöffnung.

Manuelle Aufbereitung

oder



3 Maschinelle Reinigung

Bauen Sie das Pop-up und den Deckel auseinander. Bereiten Sie alle Einzelteile im Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) bei 60-70°C mindestens 5 min. auf.



8 Eimer verschließen

Setzen Sie den Deckel wieder auf den Eimer. Drücken Sie den Deckel sowie die Verschlusskappe der Entnahmeöffnung fest nach unten, um diese wieder dicht zu verschließen.

Maschinelle Aufbereitung



4 Eimer trocknen

Lassen Sie den Spendereimer nach der Desinfektion vollständig trocknen. Bauen Sie den Deckel wieder zusammen. Danach kann die Neubefüllung wie die Erstbefüllung stattfinden.



9 Beschriften & Bekleben

Beschriften Sie das mitgelieferte Etikett mit Ihrem Namen, der Desinfektionslösung inkl. Chargennummer, Datum sowie der Standzeit des befüllten Eimers. Kleben Sie das Etikett auf den Eimer. Die Standzeit beträgt bei allen Peppler-Tuchsystemen 28 Tage.

Wir empfehlen maximal 6 Aufbereitungszyklen.

Die Verarbeitung und Umfüllung der von uns gelieferten Produkte liegt in Ihrem Verantwortungsbereich, da für uns keinerlei Kontrollmöglichkeiten bestehen. Soweit wir mündlich oder schriftlich anwendungstechnisch beraten, gilt diese Beratung als unverbindlicher Hinweis. Unsere Haftung ist in jedem Falle und für alle Schäden auf den Wert der von uns gelieferten und von Ihnen hergestellten und verwendeten Ware beschränkt. Die einwandfreie Qualität unserer Produkte wird nach Maßgabe unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen gewährleistet.

Stand des Anwendungshinweises: August 2025 5551